

**MagVenture** TMS Therapy  
Stimulating mental health.

# **TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE DU TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF\***

- ✓ Séances de traitement de 18 minutes
- ✓ Intervention ambulatoire
- ✓ Traitement non médicamenteux, sans anesthésie
- ✓ Solution de traitement dédiée pour atteindre les structures plus profondes


# INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

MagVenture TMS Therapy® a obtenu le marquage CE en tant que traitement complémentaire des patients adultes souffrant de TOC.

MagVenture a développé une bobine magnétique particulièrement adaptée pour atteindre les zones corticales plus profondes nécessaires au traitement par SMT des TOC.

“  
**L'obtention de ce nouveau marquage CE indique à quel point le traitement par SMT est polyvalent, permettant de cibler différentes régions du cerveau avec différents paramètres de stimulation.**  
Prof. Dr Alexander T. Sack, professeur de stimulation cérébrale à l'université de Maastricht et au centre médical universitaire de Maastricht et directeur du cours en préparation à la certification clinique de SMT.

## L'efficacité au regard des TOC

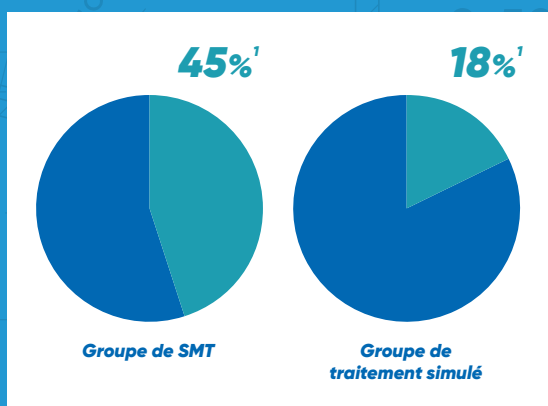

Graphisme réalisé par MagVenture, sur la base de :

1 At one-month follow-up (Suivi à un mois): Carmi et al., 2018, Am J Psychiatry.

## La SMT pour le traitement des TOC

La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) utilise des impulsions magnétiques répétées dans le but de stimuler une zone spécifique du cerveau afin de réduire les symptômes des TOC. La zone de traitement est le cortex préfrontal dorsomédian. Les effets secondaires les plus courants sont les maux de tête et les nausées.

La durée du traitement est de 6 semaines pour un total de 29 séances :

- 1 séance de traitement par jour, pendant 5 jours (semaine 1-5).
- 1 séance de traitement par jour, pendant 4 jours.
- Une provocation individualisée des symptômes est effectuée au préalable à chaque traitement dans le but d'activer le réseau neuronal concerné.



### Souhaitez-vous plus informations ?

MagVenture propose des solutions allant des systèmes les plus simples aux configurations adaptées à une capacité de traitement d'un flux élevé de patients et permettant une mise à niveau pour d'éventuelles indications futures. Les produits MagVenture sont disponibles dans le monde entier par l'intermédiaire direct de filiales de vente en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil. Ils se retrouvent également dans plus de 60 pays par l'intermédiaire de partenaires mondiaux soigneusement sélectionnés.

Pour en savoir plus, veuillez contacter MagVenture directement à l'adresse suivante : [info@magventure.com](mailto:info@magventure.com) ou visitez simplement [www.magventure.com](http://www.magventure.com)

### Marquage CE

“MagVenture TMS Therapy® est indiqué en tant que « traitement complémentaire des patients adultes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ».



# M